



WIDEX **MOMENT** UYGULAMASI

ÖZET TANITIM

TÜM WIDEX **MOMENT**™ BLUETOOTH İŞİTME CİHAZI MODELLERİ

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



BAŞLARKEN



Widex Moment uygulaması, Widex Moment Bluetooth® işitme cihazlarıyla çalışmak için tasarlandı.

Bu uygulama ile işitme cihazlarınızı kumanda edebilir ve kişiselleştirebilirsiniz, iOS ve Android işletim sistemli cihazlardan doğrudan ses aktarabilirsiniz.

Widex Moment uygulamasını App Store veya Google Play'den indirebilirsiniz.



WIDEX **MOMENT** İLE CEP TELEFONUNU EŞLEŞTİRMEK



APPLE iOS

1. Settings menüsüne girin ve Bluetooth® şikkını seçin.
2. Ayarlar > Erişilebilirlik> İşitme Cihazları şikkını seçin.
3. İşitme cihazlarınızı kapatın ve tekrar açın.
4. MFi işitme cihazları listesinden işitme cihazlarınızı seçin ve her biri için eşle tuşuna basın
5. İşitme cihazlarınız artık cep telefonunuzla eşlenmiştir, müzik dinleyebilir ve görüşmeleri aktarabilirsiniz.
6. Uygulamayı çalıştırarak işitme cihazlarınızı uygulamaya bağlayın.

ANDROID

1. Ayarlar menüsüne girin ve Bluetooth® şikkını seçin.
2. İşitme cihazlarınızı kapatın ve tekrar açın.
3. Her bir işitme cihazınızı bulun ve eşleyin
4. İşitme cihazlarınız artık cep telefonunuzla eşlenmiştir, uygulamayı kullanabilirsiniz.

WIDEX MOMENT ANA EKRAN

Uygulama
yardım bilgileri

Bağlantı veya pil
durumu

Sesi sıfırla

Ek seçenekler
(ses harici
ayarlar)

Değişiklikleri kişisel
program olarak
kaydet

Sesi kıs ve ayarla


Genel ses
ayarları

Program seç

Ana ekran ve menü

Sesim

Rehberim

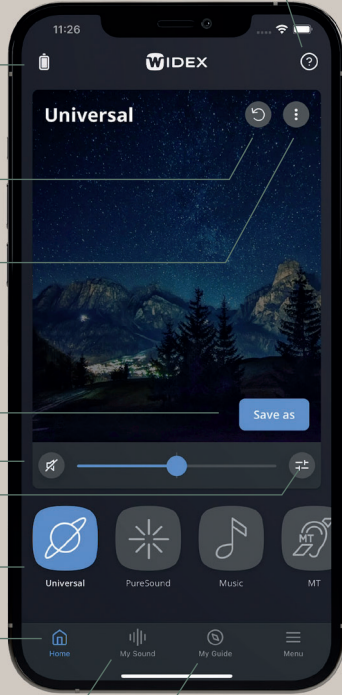


GÜNCEL KALIN

Telefonunuz ve işitme cihazlarınız için güncellemeler hazır olduğunda size otomatik mesaj gönderilir.

En yeni işlevleri kurmak için güncellemeleri kabul etmeniz gerekir.

MOMENT işitme cihazınızı en iyi şekilde kullanmanız için bilgiler ve talimatlar, uygulamanın Rehberim (My Guide) sayfasında bulunmaktadır.

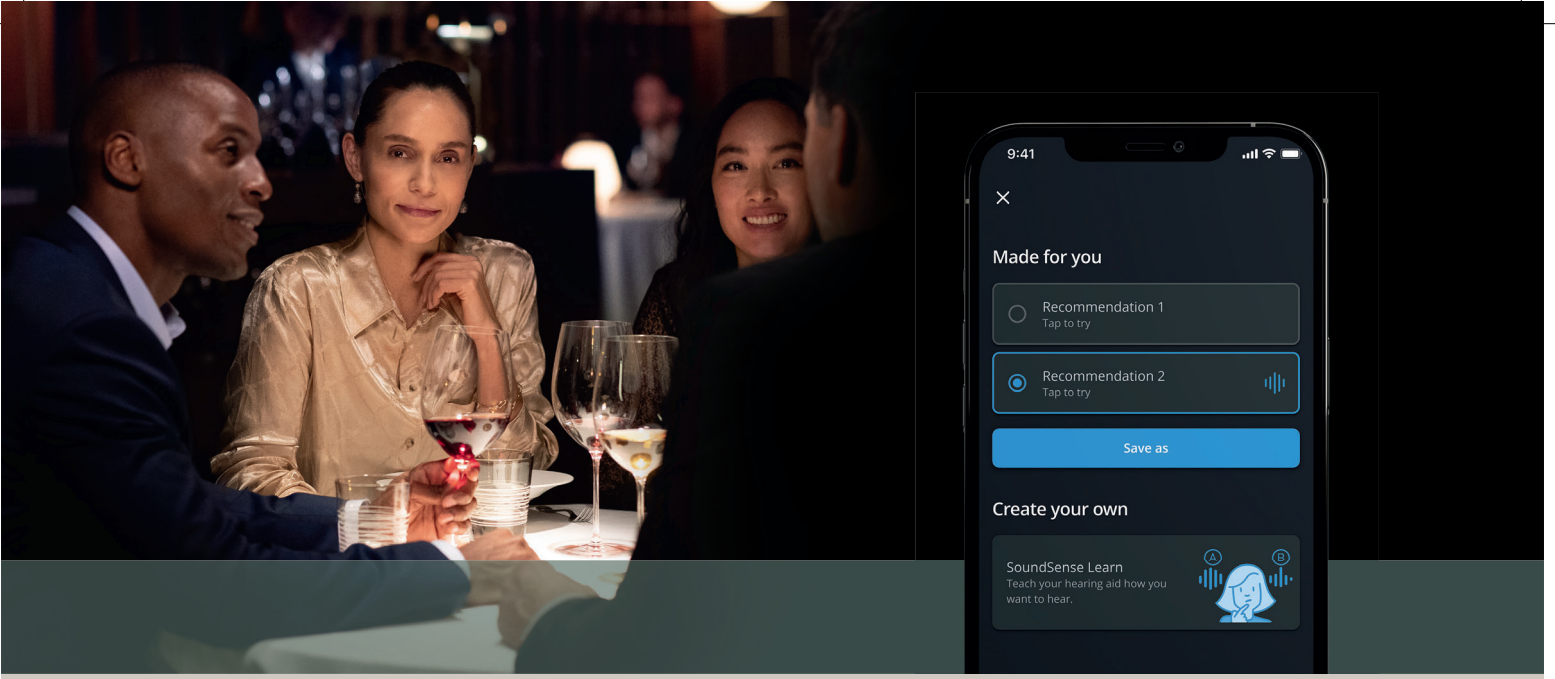

GERÇEK HAYAT VERİLERİNİZİ PAYLAŞIN

Widex Moment uygulaması, bazı verilerinizi paylaşmak için izin vermenizi ister.

Önce verileri Widex ile paylaşmanızı ister. Bu paylaşım, işitme deneyiminizi geliştirmemize ve gelecekte daha bile iyi işitme cihazları üretmemize yardım etmektedir.

Sonra verilerinizi işitme uzmanı ile paylaşmak için izin vermeniz istenir. Bu istek, sadece işitme uzmanı ile paylaşmayı önceden kabul ettiyseniz yapılır.

Bu verilerin paylaşılması halinde işitme uzmanı, uygulamada yaptığınız işitme ayarlarına erişebilir. Böylece cihazı daha çok kişiselleştirmek mümkün olur.

Tüm veriler güvenli şekilde şifrelenmektedir.

İSTEDİĞİNİZ İŞİTMEYİ TASARLAYIN

İşitme cihazlarınızın sesini istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar, işitme uzmanının belirlediği ayarları değiştirmez.

Sesi üç şekilde ayarlayabilirsiniz:


- My Sound ve içerdiği SoundSense Learn
- Genel ses ayarları
- Yönlenme odak noktası

SIZE ÖZEL SES

Uygulamanın Sesim (My Sound) özelliği, yapay zekanın gücünü düzenleyerek sesi istediğiniz gibi ayarlamanıza yardım eder.

İsterseniz yapay zekanın size bir dizi ses karşılaştırmasını göstermesi şıkkını seçebilirsiniz, bu durumda sesi bulunduğunuz ortama göre ayarlayabilirsiniz, ya da dünya genelinde çok sayıda Widex Moment kullanıcısının benzer durumlarda yaptıkları tercihlere göre otomatik olarak ses profili oluşturma şıkkını seçebilirsiniz!

1. Sesim (My Sound) sayfasına girin
2. Optimize Etmeye Başla komutunu seçin
3. Situation (Durum) ve Intention (Amaç) seçin
4. Uygulama sizin için iki tane yapay zeka tabanlı tavsiye (Made for You) gösterir...
5. Veya Kendin Oluştur şıkkını seçerek bir dizi ses karşılaştırması yoluyla kendi özel ses ayarınızı yapabilirsiniz.

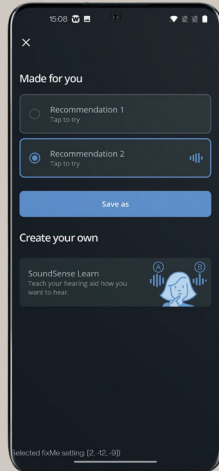


SIZE ÖZEL AYARLAR

SoundSense Learn basit bir görevdir, içerdiği yapay zeka belirli ortamlar için size özel ayarları kişiselleştirmeniz için yol gösterir.

Bu özelliğe ana ekranın altına dokunarak girebilirsiniz.

SoundSense Learn iki ses profili sunmaktadır: A ve B. Bu iki ses profilini dinleyin ve istediğiniz profili mavi imleç ile işaretleyin. İleri tuşuna bastığınızda bu seçime göre hazırlanan iki yeni ses profili ekranda gösterilir.

Bu işlemi tamamlanıncaya kadar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sonra bu ayarları kişisel programınız olarak kaydedebilirsiniz.

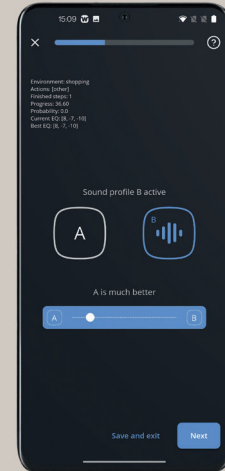

GENEL SES AYARLARI

Ana ekrandaki  ikonuna tıklayarak genel ses ayarları sayfasına gidin:

- Sol/sağ ses: Sol ve sağ işitme cihazı ses ayarını ayrı ayrı yapmak içindir
- Ekolayzer: Sesi kişiselleştirmek için bas, orta veya tiz perdeye ayarlamak içindir, isterseniz ekranın altında gösterilen hazır ayarlardan birini deseçebilirsiniz
- Ses mikseri: İşitme cihazlarınızın çevrenize mi yoksa ses aktarma gibi bir girdiye mi odaklanmasını seçmek içindir (sadece ses aktarma ve belirli bazı programlar sırasında gösterilir)


YÖNLENME ODAK NOKTASI

Yönlendirme odak noktası işleviyle sesin geldiği öne, arkaya, sola veya sağa odaklanabilirsiniz.

Ana ekrandaki programlar menüsünden yönlendirme odak noktası ikonuna  dokununuz ve yönelmek istediğiniz yönü seçin.

KİŞİSEL PROGRAMLAR

Ayarları yaptıktan ve istediğiniz sesi elde ettikten sonra kaydedebilirsiniz. Ana ekranda kaydet komutuna dokununuz ve programa bir isim ve ikon verin. Programı uzun süre basılı tutarak programı kullanmak istediğiniz mekanı da ekleyebilirsiniz. Bu durumda o mekana gittiğinizde işitme cihazları otomatik olarak o programı çalıştırır.

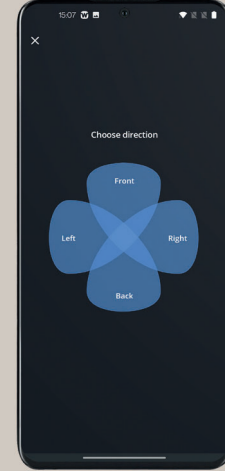

SORUNLARI ÇÖZMEK

Eşleme sırasında sorunla karşılaşırsanız:

- Bluetooth® şıkkının seçili olduğundan ve işitme cihazlarınızın cep telefonunuza yakın olduğundan emin olun.
- İşitme cihazlarınızın pillerini değiştirin / şarj edin.
- İşitme cihazlarınızı kapatın ve tekrar açın. İşitme cihazları açılmalarından itibaren üç dakika süreyle eşleme konumunda kalır.
- Cep telefonunuzun Uçak (Flight) konumunu açın ve kapatın
- İşitme cihazlarınızı açın ve eşleme işlemi yapın

Eşleme hala yapılamazsa:

- İşitme cihazlarınızın eşlenmesini iptal edin ve tekrar eşleyin
- Widex Moment uygulaması çalışıyorsa kapatın
- Cep telefonunuzu kapatın ve açın
- İşitme cihazlarınızı açın ve eşleme işlemi yapın

iOS işletim sistemli telefonlarda aktarma sorunuyla karşılaşırsanız:

- İşitme cihazlarınızın cep telefonunuzla eşlendiğinden emin olun
- Ayarlar > Erişilebilirlik> İşitme Cihazları> >Otomatik Yönlendirme şıkkını seçin. Arama sesi ve Yayın sesi komutlarında otomatik veya Her zaman işitme cihazları şıkkı seçili olmalıdır.
- Cep telefonunuzun Uçak (Flight) konumunu açın ve kapatın
- Cep telefonunuzda Wi-Fi şıkkı seçili olmamalıdır.

Ek bilgi için

www.widex.com/tr-tr/hearing-aids/apps/moment-app



SOUND LIKE NO OTHER



Widex, WSAUD A/S'nin tescilli markasıdır.
Basım: Rosendahl a/s. 2021-09. 9 502 5401 001 #03

Apple ve Apple logosu, Apple Inc'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
App Store, Apple Inc'in hizmet markasıdır.

Android, Google Play ve Google Play logosu,
Google Inc'in markalarıdır.

Önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir..